

THERMOCARE *Convenience*



Wärme ist **Geborgenheit**

Beheizte Liegefläche

Erstversorgung

Reanimation

Wickeln

Untersuchen

Behandeln

Neugeborene brauchen eine Umgebung, die Wärme und Geborgenheit vermittelt. Vor allem Frühgeborene haben einen großen Bedarf an Zuwendung, Wärme und Schutz. Deshalb sollten Versorgungs-, Untersuchungs- und Behandlungsplätze so ausgestattet werden, dass sich die kleinen Patienten wohlfühlen.

Mit der beheizten Liegefläche aus der bewährten Modellreihe THERMOCARE 2000 kommen wir diesem Ziel einen großen Schritt näher. Sie kann als Kompaktmodul auf Arbeitsplatten und Schrankanlagen aufgesetzt oder in Wickelkombinationen integriert werden.


Zusammen mit einem Wärmestrahler der Baureihe CERAMOTHERM können nun auch an einem fest installierten Versorgungsplatz gleich gute Bedingungen geschaffen werden wie in einer mobilen Reanimationseinheit.

Die angenehme konduktive Wärme der Gelmatratze erwärmt selbst unterkühlte Säuglinge schnell und effektiv. Die Temperatur wird in Stufen von 0,1°C eingestellt, angezeigt und elektronisch überwacht. Alarme warnen bei Über- und Untertemperatur, Systemfehler oder Netzausfall, ein separater Überwachungskreis schaltet die Heizung im Fehlerfall ab.

by anandic

Beheizte Liegefläche mit Poly-Gelmatratze, 4 Gummifüßen und integrierter Ablage

THERMOCARE *Convenience* Best. Nr. **WY 2011**

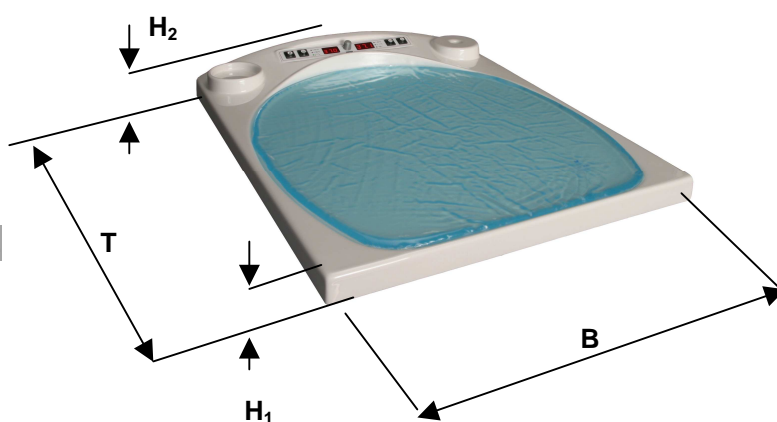

Technische Daten

Maße	T = 715 mm, B = 600 mm, H ₁ = 40 mm, H ₂ = 100 mm
Gewicht	12 kg
Betriebsspannung / Netzanschluss	~ 230 V / 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	160 W / 0,7 A
Temperatureinstellung (Sollwert), Standardbereich	35°C bis 37° C
Temperatureinstellung (Sollwert), erweiterter Bereich	30° bis 38,5° C
Sollwertanzeige	Ja
Istwert-/Restwärmeanzeige	Ja
Alarm bei Sollwertabweichung ± 1°C	Ja
Sicherheitsabschaltung bei 40°C	Ja
Netzausfallalarm	Ja
Selbsttest	Ja
Farbe	Weiß RAL 9010
Schutzklasse	1
Gerätetyp	BF
Geräteklasse lt. MPG	IIa
Normen	EN 60601 (Ausg. 1996), EN 60601-2-35*, 1997-12
Inspektion	Jährlich
Wartung	Jährlich

* Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Matten, Unterlagen und Matratzen zur Erwärmung von Patienten in der medizinischen Anwendung.

 **WEYER** GmbH

Herrenhöhe 4 • D-51515 Kürten
Tel.: 0 22 07 / 9698-0 • Fax: 0 22 07 / 47 50
E-Mail: info@weyered.com
www.weyered.com

CE 0197