

 GLIDESCOPE®

# SPECTRUM

*Vidéolaryngoscopes à usage unique GlideScope Titanium*



 VERATHON®

by anandic®

# SPECTRUM À USAGE UNIQUE

**CONCENTREZ-VOUS SUR CE QUI COMPTE LE PLUS –  
PRENDRE SOIN DE VOS PATIENTS, DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND**

**SPECTRUM, la nouvelle génération de vidéolaryngoscope à usage unique GlideScope® Titanium, présente des avancées de pointe dans la technologie d'éclairage et de caméra, et offre une gamme complète de tailles pour tous vos patients, du plus petit au plus grand.**

Le nouveau système de vidéolaryngoscope à usage unique Spectrum combine tous les avantages du système à usage unique GlideScope Titanium de première génération avec les derniers développements en matière de technologie d'éclairage et de caméra. **Il présente six lames à usage unique Spectrum** adaptées à des patients de 1,5 kg aux adultes obèses.



**Poignée ergonomique**  
conçue pour un meilleur contrôle et plus de confort

**Lames de style Mac**  
pour une grande variété de besoins cliniques de routine

**Courbure de la lame typique GlideScope**  
pour réduire de 55 % la force de traction sur le patient et améliorer la vision de la glotte\*

**Design compact**  
jusqu'à 21 % plus fin\*\* pour une meilleure maniabilité et un espace plus grand

**Fonction antibuée performante**  
pour empêcher l'opacification de la lentille

\* Measurement of forces applied during Macintosh direct laryngoscopy compared with GlideScope videolaryngoscopy." Russell T, Khan S, Elman J, Katznelson R, Cooper RM. Anaesthesia. 2012 Jun;67(6):626-31. doi: 10.1111/j.1365-2044.2012.07087.x. Epub 2012 Feb 21.

\*\*Comparaison de hauteur de la caméra entre le LoPro S3 et la précédente lame Stat GVL 3 à usage unique

# SPECTRUM—plus de lumière utile, moins de lumière gênante

Le nouveau design Spectrum offre une visualisation claire des voies aériennes et permet une intubation rapide dans les voies normales ou avec complications. Spectrum apporte plus de lumière utile et moins de lumière gênante.

Conçus avec des composants jetables entièrement intégrés, les systèmes à usage unique Spectrum contribuent à réduire le risque de contamination croisée et aident les hôpitaux à lutter contre les infections.



## Dynamic Light Control™

Permet une **augmentation de 166 %\*** de la luminosité visible des cordes vocales pour optimiser la qualité des images.



## Ambient Light Reduction™

Élimine la lumière inutile tout au long de la procédure, avec une **réduction de 29 %\*** de l'éclairage autour du bord de l'image, ce qui vous permet de mieux vous concentrer sur la visualisation de l'anatomie d'intérêt.



## Élargir le groupe cible de patients

Étend la gamme pour inclure les plus petits patients, avec la plus **large sélection** de vidéolaryngoscopes à usage unique sur le marché.



## Composants du système SPECTRUM

### Spectrum Smart Cable

Le système à usage unique Spectrum présente également le nouveau Spectrum Smart Cable, qui contient tous les composants électroniques critiques pour utiliser toutes les possibilités du système à usage unique Spectrum, et réduit de 60 % la durée de changement de lame\*\*.



### Moniteur vidéo GlideScope®

- Fonctions de capture d'image, d'enregistrement vidéo et de lecture vidéo en temps réel permettant de confirmer facilement la mise en place de la sonde et de former des opérateurs
- Didacticiel vidéo technique intégré en 4 étapes facilitant l'apprentissage et l'utilisation du système
- Possibilité de connecter un moniteur externe à des fins de formation et d'observation



\* Comparaison de la première génération de LoPro S3 à usage unique au Spectrum LoPro S3.

\*\* Par rapport au système à usage unique GlideScope AVL lors du passage des tailles 1 ou 2 aux tailles 3 ou 4.

## Lames SPECTRUM



LoPro S1

LoPro S2

LoPro S3

LoPro S4

MAC S3

MAC S4

## Accessoires du système SPECTRUM



Chariot Premium GlideScope®



Bras de potence IV



Câble HDMI



Stylet rigide GlideRite®



Stylet à usage unique GlideRite® —  
Petit

(Pour la France :)  
**Verathon Medical France**  
2 allée d'Oslo  
67300 Schiltigheim  
France  
+33.(0) 3.88.60.14.02  
Fax: +33.(0) 3.88.60.46.87  
glidescope.com

(Pour la Belgique :)  
**Verathon Medical (Europe) B.V.**  
Willem Fenengastraat 13  
1096 BL Amsterdam  
Pays-Bas  
+31 (0) 20 210 30 91  
Fax: +31 (0) 20 210 30 92  
glidescope.com



**ANANDIC MEDICAL SYSTEMS AG**  
Stadtweg 24, 8245 Feuerthalen  
www.anandic.com  
info@anandic.com  
Tel. 0848 800 900



**Fabricant :**  
**Verathon Medical (Canada) ULC**  
2227 Douglas Road  
Burnaby, BC V5C 5A9, Canada  
Tél. : 604.439.3009  
Fax : 604.439.3039



**Représentant CE :**  
**Verathon Medical (Europe) B.V.**  
Willem Fenengastraat 13  
1096 BL Amsterdam, Pays-Bas  
Tél. : +31 (0) 20 210 30 91  
Fax : +31 (0) 20 210 30 92